

Descrizione del Kit per la raccolta del campione per analisi del DNA

Contenuto e descrizione



- A** **Box:** contiene tutto il necessario per eseguire il prelievo del campione per analisi DNA e per la spedizione del campione al laboratorio.
Riutilizzare il **Box** per spedire il campione per analisi DNA a Sorgente Genetica. **NON BUTTARE**
-
- B** **Kit per il prelievo del campione per analisi DNA:**
B.1 **Tampone buccale** composto da asta in plastica e parte terminale bianca in viscosa preposta alla raccolta del campione di saliva
B.2 **Custodia cilindrica in plastica**
B.3 **Tappo in plastica**
-
- C** **Confezione argentata** contenente una capsula deumidificante color arancione. Una volta utilizzata la capsula potrebbe cambiare colore per effetto dell'assorbimento dell'umidità
-
- D** Nr. 2 **Etichette adesive con codice a barre:** una da utilizzare solo nel caso in cui la prima venga smarrita
-
- E** **Busta trasparente** con chiusura a zip
-
- F** **Adesivo tondo Sorgente**
-
- G** **Busta DHL** con modulo di spedizione

Avvertenze e raccomandazioni

- ⊕ Il tampone buccale contenuto nella confezione è monouso e serve solo ed esclusivamente per eseguire un auto-prelievo delle cellule epiteliali presenti nella saliva e nella parte interna della guancia
- ⊕ Il tampone buccale deve essere utilizzato da una singola persona
- ⊕ Il tampone buccale deve essere utilizzato solo se la confezione è integra
- ⊕ Non utilizzare il tampone buccale per usi e scopi diversi da quelli riportati nel presente documento di istruzioni
- ⊕ Non utilizzare il tampone buccale su animali o oggetti
- ⊕ Non ingerire il tampone buccale
- ⊕ Utilizzare la capsula deumidificante (Dri-Capsule) solo se integra e di colore arancione
- ⊕ Non ingerire la capsula deumidificante (Dri-Capsule)
- ⊕ Non manomettere o tentare di rompere o aprire la capsula deumidificante (Dri-Capsule)
- ⊕ Tenere lontano dalla portata dei bambini e di persone non autosufficienti
- ⊕ Assicurarsi che l'ambiente di utilizzo del tampone buccale sia pulito e asciutto
- ⊕ Assicurarsi di avere le mani e la faccia ben pulite prima di utilizzare il tampone buccale

Istruzioni per il corretto utilizzo del Kit

Come registrare il kit online

1. Creazione e accesso a account personale MySorgente



- Se non hai un account MySorgente: entra nel sito www.sorgentegenetica.it e crea il tuo account personale (link in alto a destra con logo MySorgente)
- Se hai un account MySorgente: entra nel sito www.sorgentegenetica.it e accedi al tuo account personale (link in alto a destra con logo MySorgente)

2. Registrazione del kit online

Nel tuo account MySorgente cliccare sul link "Registra il Kit".

Registra il kit

Inserire il sottostante **Codice tampone** nello spazio apposito

3. Compilazione del questionario (solo per il test Salute completa)

Compila il questionario

Se devi fare un test "Salute completa" compila il questionario stile di vita presente nel tuo account MySorgente

Come raccogliere il campione di saliva utilizzando il tampone buccale

Si consiglia di utilizzare il tampone buccale un'ora dopo aver mangiato, bevuto, pulito i denti. Per un risultato ottimale si consiglia di risciacquare la bocca con acqua prima di utilizzare il tampone buccale


4. Raccolta del campione di saliva



I. Estrarre dalla confezione (B) il Kit per il prelievo del campione per analisi DNA



II. Estrarre il tampone buccale (B.1) dalla custodia cilindrica in plastica (B.2) avendo cura di non toccare con le mani la parte terminale bianca

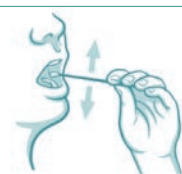

III. Introdurre il tampone buccale (B.1) all'interno della bocca e strofinare energicamente per circa 60 secondi la parte terminale bianca del tampone sull'interno guancia. Strofinare con un lento movimento dall'alto al basso del tampone buccale (B.1)




IV. Riporre il tampone buccale (B.1) nella custodia cilindrica in plastica (B.2) avendo cura di non toccare con le mani la parte terminale bianca



V. Spezzare con il pollice l'asta in plastica del tampone buccale (B.1) in corrispondenza dell'incisione e lasciare cadere la parte terminale bianca all'interno della custodia cilindrica in plastica (B.2) non toccare con le mani la parte terminale bianca



VI. Rimuovere la capsula deumidificante color arancione (Dri-Capsule) dalla confezione argentata (C)

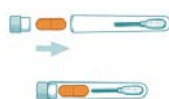

VII. Inserire la capsula deumidificante color arancione nella custodia cilindrica in plastica (B.2) e sigillare con il tappo in plastica (B.3)

5. Preparazione del campione per la spedizione al laboratorio



I. Attaccare una delle due etichette adesive con codice a barre (D) sulla custodia cilindrica in plastica (B.2)



II. Inserire il tampone buccale (sigillato ed etichettato) nella busta trasparente (E). Sigillare la busta trasparente con la zip



III. Porre la busta trasparente nel Box (A) Sigillare con adesivo tondo Sorgente (F)



IV. Porre il Box (A) nella busta DHL (G). Sigillare la busta DHL

Come spedire la busta DHL contenente il campione di saliva

6. Spedizione



Compilare il campo mittente nel modulo di spedizione allegato alla busta DHL (G).
Spedire entro 5 giorni dal prelievo utilizzando UNA delle seguenti opzioni:

199 199 345

I. **Ritiro dedicato:** chiamare il numero DHL 199 199 345 e fissare un appuntamento per il ritiro della busta direttamente a casa vostra. Il costo della spedizione è a carico di Sorgente. Se richiesto fornire all'operatore DHL il seguente codice cliente: 105885447

199 199 345

www.dhl.it

II. **Centro DHL:** consegnare il pacco al centro convenzionato DHL più vicino. Per trovare il centro DHL più vicino: chiamare il numero DHL 199 199 345 o utilizzare il sito web www.dhl.it

Come ottenere il referto

7. Visualizzazione/stampa del referto del test



Dopo circa **tre settimane** dalla spedizione del campione Sorgente avvisa via email che il referto è pronto: accedere alla propria sezione online MySorgente per visualizzarlo o stamparlo

Se hai seguito correttamente le istruzioni una volta spedita la busta DHL avanzano:

1. Un'etichetta con codice a barre (che puoi buttare)
2. Queste istruzioni

Bisogno di aiuto?

Visita la sezione FAQ (domande frequenti) sul sito www.sorgentegenetica.it o chiamaci al numero verde 800 888 155